



MANUEL D'UTILISATION

AIDY™

24 Bd du Montparnasse, 7015 Paris, France

Juillet 2026

Table des matières

1.	Description :.....	2
2.	Utilisateurs :.....	2
3.	Prérequis d'utilisation :	2
4.	Mode d'emploi :.....	3
5.	Effets secondaires :	7
6.	Mesures de stockage et de conservation :.....	7
7.	Mise à jour :.....	7
8.	Mises en garde :.....	7

1. Description :

AIDY est une application mobile d'aide à l'identification précoce, sans validation de diagnostic et en vue de l'orientation vers une évaluation clinique spécialisée pour les patients atteints de maladies génétiques avec une dysmorphie crâniofaciale.

Basée sur une technologie d'intelligence artificielle avancée, AIDY s'appuie sur des algorithmes à l'état de l'art pour analyser des images 2D de face et de profil de patients.



Contre-indication : AIDY n'est pas un outil d'aide au diagnostic. Seule l'investigation clinique est en mesure de réaliser un diagnostic

2. Utilisateurs :

L'application est dédiée exclusivement aux professionnels de santé.

3. Prérequis d'utilisation :

Pour avoir un bon fonctionnement de l'application AIDY, les critères suivants sont requis :

- Un smartphone sous Android (version 8.0 ou ultérieure) / Apple (version iOS 16.4 ou ultérieure) équipé d'une appareil photo de bonne résolution.
- Une connexion internet.
- Numéro de la Carte Professionnels de Santé (CPS).
- Application e-CPS.

Installation et activation de l'application e-CPS

1. Téléchargez l'application e-CPS disponible sur l'App Store et le Google Play

Lien de téléchargement Apple Store : <https://apps.apple.com/us/app/e-cps/id1469033607>

Lien de téléchargement Android Store :


<https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.asipsante.esante.wallet.prod>

2. Lancez l'application e-CPS et appuyez sur « Commencer l'activation »
3. Acceptez les conditions générales d'utilisation
4. Cliquez sur « Envoyer une demande d'activation »
5. Saisissez votre identifiant national puis cliquez sur « Envoyer ma demande d'activation » pour recevoir le mail avec le QR code
6. Ouvrez le mail avec le QR code et appuyez sur « Démarrer l'activation »
7. Appuyez sur « par SMS » pour recevoir le message contenant le code d'activation puis sur « Envoyez »

8. Le code d'activation est récupéré automatiquement par l'application e-CPS – si ce n'est pas le cas, récupérez le code reçu par SMS et entrez ce code dans l'application e-CPS
9. Sur mon téléphone, créez puis confirmez un mot de passe qui servira à déverrouiller et utiliser votre e-CPS

L'application est disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargements Google Playstore et AppStore.

4. Mode d'emploi :

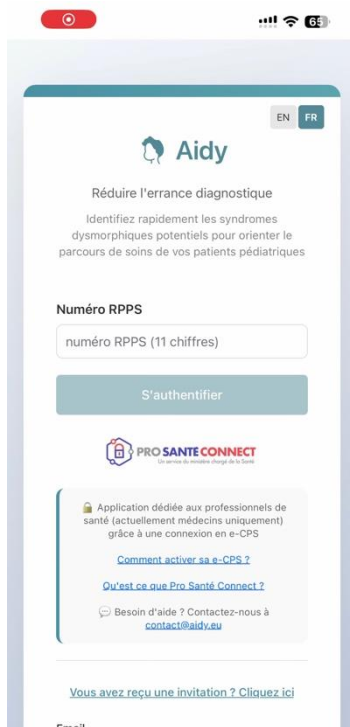

Authentification via e-CPS :


- Tapez votre numéro RPPS dans la zone indiquée et appuyez sur « S'authentifier »
- Dans la page suivante, appuyez sur la notification reçue qui vous redirige vers l'application e-cps en mémorisant le numéro affiché.
- Entrez votre mot passe et sélectionnez le numéro qui a été affiché dans l'application AIDY.
- Retournez sur l'application AIDY et là vous êtes connecté.

Lancement de l'analyse



Pour commencer l'analyse des images, vous appuyez sur le bouton « Démarrer l'évaluation » dans la page d'accueil qui vous redirige vers une autre qui contient les recommandations pour une prise de photo optimal (luminosité, expression du visage, etc ...)


Prise de photo

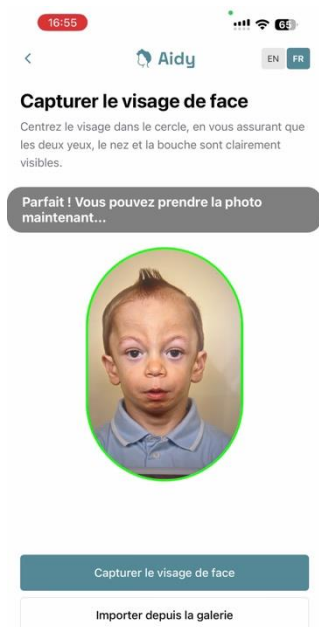

**Illustrations effectuées avec photos de patients synthétiques (ce ne sont pas des patients réels)*

Ensuite vous allez procéder à la prise de photo de face et de profil du patient tout en prenant en compte les indications mentionnées dans la page précédente. Vous pouvez aussi télécharger les images à partir de votre photothèque en appuyant sur le bouton « importer depuis la galerie ».

Lancement de l'analyse

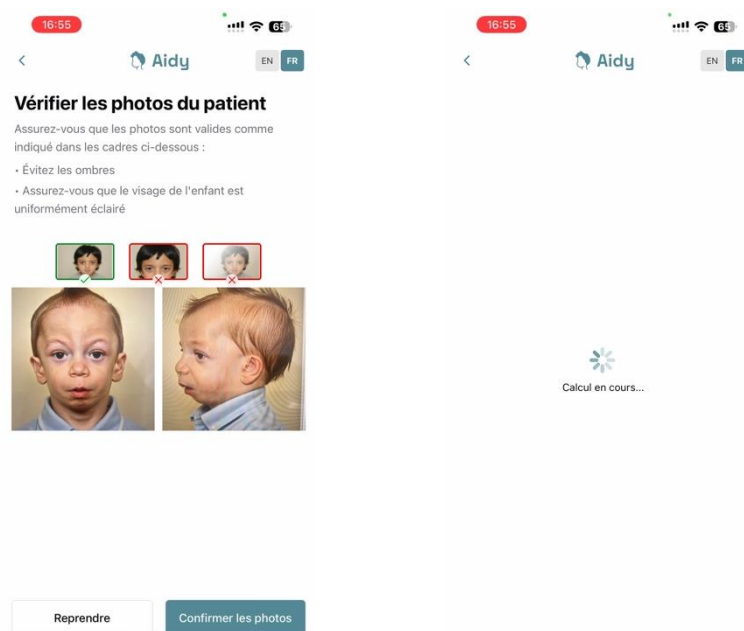

Après avoir confirmé que les photos sont de bonnes qualités, ces derniers seront envoyés vers le serveur pour le traitement.

Signes cliniques



Quelques questions supplémentaires sont proposées autour des signes cliniques afin d'affiner les résultats de l'analyse de photos.

Affichage des résultats

15:35 5G 27%

Aidy EN FR

Indicateur statistique de dysmorphie

Absente à minime Minime à modérée **Modérée à élevée** Élevée

Témoins Patients syndromiques

Syndromes proches

Nom du syndrome → Syndrome de Nager

Code ORPHA de la pathologie → Code ORPHA 245

Score de similarité → 0.50

Photos synthétiques

Centres de référence

Carte des centres de références

Dès la fin de cette étape, une page s'affiche qui comprend les différents résultats de l'analyse de la/les photos :

- Indicateur de dysmorphologie
- Nom du syndrome
- Code ORPHA
- Score de similarité
- Carte des centres de références
- Photos synthétiques (si existantes)

5. Effets secondaires :

L'application AIDY ne provoque aucun effet secondaire. Cependant, tout événement grave lié à l'utilisation du dispositif doit être signalé au fabricant ainsi qu'à l'autorité compétente du pays où se trouve l'utilisateur.

Pour plus d'informations : <https://ansm.sante.fr/documents/reference/declarer-un-effet-indesirable>

6. Mesures de stockage et de conservation :

Les photos sont stockées uniquement sur votre smartphone. Aucune donnée patiente n'est stockée en ligne. Seul un identifiant unique est stocké sur nos serveurs pour chaque utilisateur afin suivre les statistiques d'utilisation et d'améliorer nos services. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer à la politique de confidentialité des données : <https://aidy.eu/politique-de-confidentialite>

7. Mise à jour :

Pour garantir le bon fonctionnement et les performances de l'application, il est essentiel de mettre à jour l'application mobile dès qu'une nouvelle version est disponible.

8. Mises en garde :

- L'application AIDY ne remplace ni le médecin ni tout autre professionnel de santé.
- Le dispositif doit être utilisé avec un smartphone avec une appareil photo en bon état, doté d'une batterie suffisamment chargée et d'une connexion internet stable, afin d'éviter toute interruption imprévue.